

Heraeus Kulzer

Mitsui Chemicals Group

iCEM®

iCEM® Self Adhesive

Le meilleur moyen
de sceller.




La santé bucco-dentaire entre de bonnes mains.

iCEM® Self Adhesive — Beau et intelligent.


iCEM Self Adhesive – Le meilleur moyen de sceller.

iCEM Self Adhesive est une résine de collage prête à l'emploi qui associe une puissance fiable, une mise en œuvre simple et rapide et un risque de sensibilité postopératoire réduit. **Ce qui signifie que pour les restaurations indirectes, on peut maintenant mordancer, apprêter, coller et sceller en un seul temps.**

De nombreuses études scientifiques* ont démontré que la formulation de iCEM Self Adhesive combine les avantages de la mise en œuvre facile des ciments classiques et les propriétés mécaniques et esthétiques des résines de collage ou de scellement.

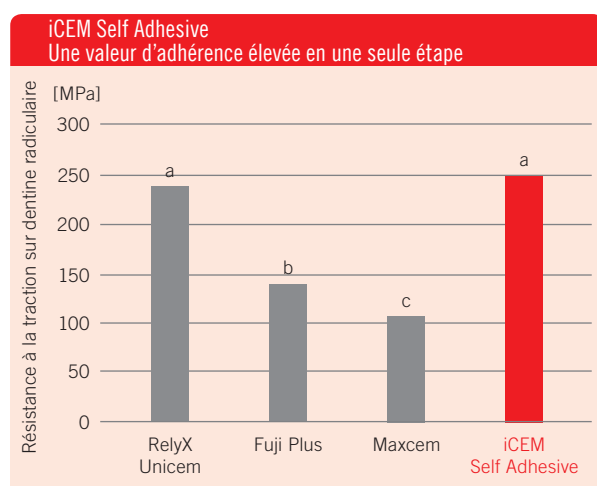

Source: Duong T, Perry R and Lopez L (2008). Tensile Testing of Three Self-Etch Cements with Titanium Paraposts./J Dent Res/87(Spec Iss A): 660, 2008.

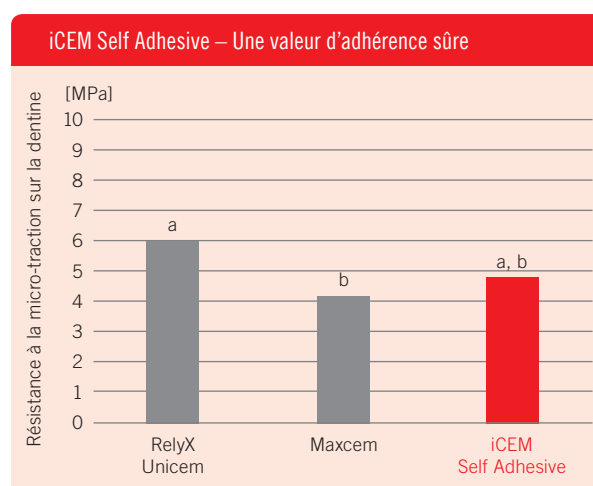

Source: Thompson FY, Teixeira E, University of Texas and University of North Carolina, USA 2007. Données fichées.

Il n'y a pas de différences significatives entre les valeurs dont les lettres sont identiques.

Indications et produits – intelligente polyvalence.

iCEM Self Adhesive est d'un emploi polyvalent : **vous pouvez l'utiliser dans bien des situations car il adhère à divers substrats.**

Indications d'iCEM Self Adhesive :

- Scellement de couronnes et bridges en métal ou céramo-métalliques.
- Scellement d'inlays et d'onlays en céramique ou en composite.
- Scellement de tenons en métal, en titane ou en fibre de verre.
- Collage de dispositifs en nylon pour la réalisation d'attelles de contention.
- Scellement adhésif de couronnes et bridges en tout céramique fabriqués avec un système Cerec®.
- Scellement adhésif de couronnes et bridges en céramique renforcée (zircone, par exemple).



iCEM Self Adhesive est un dispositif médical de classe IIa. Indication : composite de scellement auto-adhésif. CE 0197. Embouts mélangeurs pour iCEM Self Adhesive sont des dispositifs médicaux de classe I. CE. Fabricant : Heraeus Kulzer GmbH. Produits réservés aux professionnels de santé, non remboursés par la sécurité sociale. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation.

Manipulation facile – Intelligente mise en œuvre.

iCEM®

iCEM Self Adhesive est une résine de scellement auto-adhésive à prise duale, qui permet:
le mordançage, l'apprêt, le collage, la désensibilisation et le scellement en une seule étape.

iCEM Self Adhesive	
Préparation de la résine de collage	
Ouvrir la capsule avec l'activateur	
Charger/mélanger la capsule dans le mélangeur	
Placer la capsule dans l'applicateur	
Fixer l'embout mélangeur	■
Mélanger la pâte à la main sur un bloc de mélange	
Conditionnement de la dent préparée	
Rincer la préparation et sécher	■
Mélanger le primaire	
Appliquer le primaire	
Attendre 60 secondes	
Sécher	
Préparation de la restauration	
Selon les instructions du fabricant	■
Scellement	
Appliquer le ciment	■
Placer la restauration en bouche	■
Éliminer les excès	■
Photopolymériser ou auto-polymérisation	■
Nombre d'étapes requises	7

iCEM Self Adhesive est très pratique: il s'applique directement sur la préparation ou dans la cavité à l'aide d'une seringue d'auto-mélange. Aucun dispositif supplémentaire de mélange ou d'application n'est nécessaire. Les excès peuvent être facilement éliminés après une brève exposition à la lumière d'une lampe à photopolymériser. Du fait de son excellente stabilité, il se conserve très bien à température ambiante.

Ce produit a un effet désensibilisant qui réduit significativement le risque de sensibilité postopératoire. Les principales causes de sensibilité postopératoire (tubules dentinaires exposés, dentine trop séchée, dentine trop mordancée) sont automatiquement exclues.

Aucune sensibilité postopératoire n'a été ressentie par des patients traités avec iCEM Self Adhesive lors des évaluations cliniques.

iCEM Self Adhesive Seringue à l'unité

1 seringue Automix x 5 ml (7 g)
15 embouts mélangeurs
Mode d'emploi illustré
Référence: 66036084

iCEM Self Adhesive Value Pack Seringues

3 seringues Automix x 5 ml (7 g)
45 embouts mélangeurs
Mode d'emploi illustré
Référence: 66037633

iCEM Self Adhesive Recharge d'embouts mélangeurs

50 embouts mélangeurs
Référence: 66036085



iCEM Self Adhesive est un dispositif médical de classe IIa. Indication : composite de scellement auto-adhésif. CE 0197. Embouts mélangeurs pour iCEM Self Adhesive sont des dispositifs médicaux de classe I. CE. Fabricant : Heraeus Kulzer GmbH. Produits réservés aux professionnels de santé, non remboursés par la sécurité sociale. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation.

Flexitime®

Flexitime® –
Une précision garantie. Tout le temps.

A-silicone: précis et stable dimensionnellement.

- **Au service de votre sécurité** : Flexitime offre une excellente précision grâce au savant dosage de ses propriétés physiques.
- **Maître de votre confort** : L'astucieux concept de temps permet de travailler sans stress en gérant efficacement les étapes de la prise d'empreinte avec une grande souplesse.
- **Maître de votre réputation** : Flexitime résout les problèmes* même dans les cas délicats, car les bonnes empreintes engendrent des prothèses qui ajustent.



* Dental Advisor 2012: Distingué comme "Clinical Problem Solver".

Flexitime, Flexitime Monophase, Flexitime Monophase Pro Scan sont des dispositifs médicaux de classe I. Indications : empreinte dentaire. Produits réservés aux professionnels de santé, non remboursés par la sécurité sociale. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Fabricant : Heraeus Kulzer GmbH. CE.

iCEM est une marque déposée d'Heraeus Kulzer. RelyX Unicem, Maxcem, Panavia et Fuji Plus ne sont pas des marques déposées d'Heraeus Kulzer. Tous les graphiques ont été réalisés par Heraeus Kulzer.

Contact pour la Suisse :
Heraeus Kulzer Austria GmbH
Nordbahnstrasse 36/STg.2/4Top 4.5
A-1020 Wien
Phone +43 (0) 1 408 09 41
Fax +43 (0) 1 408 09 41 75

Contact au Benelux :
Heraeus Kulzer Benelux B. V.
Postbus 986
NL-2003 RZ Haarlem
T +31 (0)23 543 42 50
F +31 (0)23 543 42 55
info-benelux@kulzer-dental.com

Contact en France :
Heraeus Kulzer France SAS
Les Conquérants - Bât. Everest
1, avenue de l'Atlantique
91976 Les Ulis - ZA Courtaboeuf Cedex
Tél: 01 69 19 48 85
Fax: 01 69 28 78 22
dentaire@kulzer-dental.com
www.heraeus-kulzer.fr

heraeus-kulzer.com