



UMONIUM³⁸
maître en désinfection



UMONIUM³⁸ MEDICAL & NEUTRALIS SPRAY

Désinfecte dès 1 minute de contact

Désinfectant ultra rapide avec spectre total, UMONIUM³⁸ **MEDICAL** et **NEUTRALIS SPRAY** tue, en une seule vaporisation, tous les germes présents sur les dispositifs médicaux et les surfaces traitées (inclus le B.K., le MRSA, le Rotavirus et le *Pseudomonas*). Sa performance est garantie particulièrement là où beaucoup de désinfectants sont impuissants. Grâce à son pH7, il est sans danger pour l'opérateur et pour les matériaux. C'est le désinfectant indispensable pour préserver la santé du personnel soignant et de ses patients.

 **laboratoire**
HUCKERT'S
INTERNATIONAL
la désinfection maîtrisée

UMONIUM³⁸ MEDICAL et NEUTRALIS SPRAY

Désinfectant à action nettoyante, prêt à l'emploi

Sans aldéhyde, ni peroxyde UMONIUM³⁸ MEDICAL et NEUTRALIS SPRAY sont les seuls désinfectants totaux de grade «Non Toxique», capables de hautes performances sans présenter d'effets secondaires pour l'opérateur ni pour l'environnement. Ils dégraissent et éliminent facilement les résidus organiques tels que les traces de sang, urine, matières fécales. Simple et ergonomique, le pistolet double fonction projette une mousse idéale pour le nettoyage ou pulvérise un jet fin pour une désinfection optimale. Recommandé pour les matériaux fragiles tels que le plexiglas, silicone, polyuréthane, caoutchouc...

DOMAINES D'APPLICATION

- Dispositifs médicaux, surfaces et équipements

PROPRIETES

- Désinfectant haute puissance; bactéricide, fongicide, mycobactéricide (inclus B.K.), et virucide
- Non corrosif; compatible sur fibre optique, polycarbonate (couveuse), acrylique, verre, Pyrex, PU, PVC, HDPE, PET, néoprène, latex, silicone, peintures, acier inox 410
- Rapide: il tue les germes dès la première minute de contact
- Sans aldéhydes, ni peroxyde
- Aucune vapeur toxique, pas nocif au contact de la peau
- Non irritant
- DL₅₀ oral rat: >2000 mg/kg
- Biodégradable: >80%
- pH7 (neutre)
- Rémanent sur la surface non rincée
- Stabilité du produit=36 mois date de fabrication



- UMONIUM³⁸ MEDICAL SPRAY existe aussi sous forme d'aérosol et sous l'appellation MICROJET pour une pulvérisation encore plus fine. Ce dispositif sans gaz propulseur à effet de serre est totalement ininflammable.
- Une version sans parfum ni colorant est disponible en vaporisateur de 500ml sous l'appellation UMONIUM³⁸ NEUTRALIS SPRAY.

COMPOSITION

- N-benzyl-N-dodecyl-N,N-dimethyl-ammonium chloride/N-benzyl-N,N-dimethyl-N-tetradecyl-ammonium chloride

STANDARDS NORMATIFS

- UMONIUM³⁸ MEDICAL et NEUTRALIS SPRAY satisfait aux exigences des normes européennes EN 1040 - EN 1275 - EN 1276 - EN 1650 - EN 13697 - EN 13727 - EN 13624 - EN 14476 - EN 14348 - EN 14561 - EN 14562 - EN 14563
- Qualité et traçabilité garanties par ISO 9001/ISO 13485
- Conforme à la DE 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

MODE D'EMPLOI

- Mettre le vaporisateur en position mousse
- Vaporiser pour nettoyer les dispositifs médicaux ou surfaces, éponger ensuite terminer par une pulvérisation fine et laisser sécher. Pour le transport des instruments souillés: vaporiser avec la fonction mousse, puis laver, rincer, autoclaver
- Autonomie >1000 vaporisations (flacon 1L)
- ±180m² traités par litre

Normes	Organismes cibles	Temps de contact (min.)	
		MEDICAL SPRAY MICROJET	NEUTRALIS SPRAY
EN 1040	<i>S. aureus, P. aeruginosa</i>	5	5
EN 1275	<i>C. albicans</i>	10	10
EN 13727	<i>S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae</i>	1	10
EN 14561		30	30
EN 13624	<i>C. albicans</i>	10	10
EN 14562		15	15
EN 14348	<i>M. avium, M. terrae</i>	10	10
EN 14563		10	10
EN 14476	Adeno- & Poliovirus	1	1
EN 1276	<i>S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, E. coli</i>	5	10
EN 1650	<i>C. albicans</i>	10	10
EN 13697	<i>S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, E. coli</i>	15	15
	<i>C. albicans</i>	15	20

ARTICLE N°	DESIGNATION	CARTON
1 PF 12209	Flacon vapo 1 litre	12x1 litre
2 PF 12208	Aérosol 500ml	8x500ml
3 PF 12608	Spray prêt à l'emploi	24x500ml

Nettoyage



Passer à la désinfection

Désinfection



Dès 1 minute

www.huckerts.net

laboratoire HUCKERT'S
INTERNATIONAL
la désinfection maîtrisée

BELGIQUE
Chaussée de Namur 60
B-1400 Nivelles
Tél: +32 (0)67 89 41 00
Fax: +32 (0)67 84 37 67

FRANCE
38 Avenue du Centre
F-78230 Le Pecq-sur-Seine
Tél: +33 (0)1 39 76 15 05
Fax: +33 (0)1 39 76 11 15

G. D. LUXEMBOURG
148 Route d'Arlon
L-8010 Strassen
Tél: +352 26 39 42 60
Fax: +352 26 39 42 70