

ebrace™ wetbond™

sealant puits & fissures

LE SEALANT QUI EXPLOITE L'HUMIDITÉ NATURELLE !

- Hydrophile - s'applique sur dents humides
- Ne nécessite pas d'adhésifs - Économie de temps
- Application simple et rapide
- Libération de fluor prolongée
- Marges virtuellement indétectables
- **Sans Bisphénol A - sans Bis-GMA**
- Photopolymérisant
- Radio-opaque
- Réduit le risque de micro-fuites
- Propriétés antibactériennes
- Disponible en deux teintes: blanche ou naturelle



"Le produit épouse incroyablement la dentine, et rend les marges virtuellement indétectables"





DES PROPRIÉTÉS INÉGALÉES

Embrace™ Wetbond™ sealant pour puits & fissures possède des propriétés hydrophiles uniques qui lui offrent une adhésion particulièrement efficace dans un environnement humide.

Grâce à ses propriétés anti-bactériennes et son intégration parfaite à la dentine, les dents sont protégées contre les caries pour longtemps.

Il a été prouvé lors d'études indépendantes menées par les docteurs O'Donnell JP, Silva KG et Naorungroj S., que Embrace™ Wetbond™ sealant pour puits & fissures est un antibactérien, efficace à long terme. En outre, il ressort qu'aucun autre matériau ne regroupe tous ces avantages en un seul produit.

Sur 334 dents traitées avec Embrace™ Wetbond™ sealant pour puits & fissures, seulement 3 patients ont eu des problèmes de caries, 6 ans après l'application (étude menée par le Dr. O'Donnell JP, 2008).

Procédure d'application par le Dr. Christopher Ramsey Embrace™ Wetbond™ sealant puits & fissures



1 Nettoyer la dent puis appliquer Etch-Rite™ pendant 15 secondes.



2 Rincer et sécher légèrement. Appliquer Embrace™ Wetbond™ sealant pour puits & fissures sur les dents humides.




3 Photopolymériser. Embrace™ Wetbond™ sealant pour puits & fissures réagit avec toutes les sortes de lumière.



4 Après durcissement, les marges sont virtuellement indétectables, même avec une sonde.

Adaptation exceptionnelle


La résine Embrace™ Wetbond™ sealant pour puits & fissures s'intègre parfaitement à la dent. En créant des marges virtuellement indétectables, elle réduit considérablement le risque de micro-fuites qui favorisent l'intrusion de bactéries.

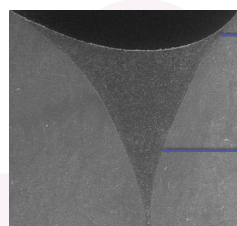

Marges indétectables

Intégration parfaite à la dentine

ebrace™ wetbond™
sealant puits & fissures

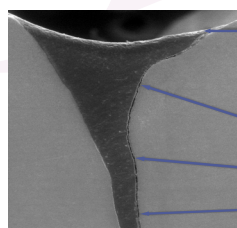

Marges imprécises

Espaces

Sealant traditionnel

Propriétés physiques

Résistance à la compression: 34800 psi, 240,0 MPa

Résistance à la traction: 6300 psi, 43,4 MPa

Pourcentage Solubilité: 0,06%

Épaisseur du film: 12 microns

Références

EMS	Kit 4 seringues de 1,2 ml, Teinte naturelle + 20 embouts
EMSB	Bulk Pack 20 seringues de 1,2 ml, Teinte naturelle + 100 embouts
EMSW	Kit 4 seringues de 1,2 ml, Teinte blanche + 20 embouts
EMSWB	Bulk Pack 20 seringues de 1,2 ml, Teinte blanche + 100 embouts
22K20	20 embouts
22K100	100 embouts

«C'est un produit absolument sensationnel»

Docteur John D. Doykos III

Embrace™ Wetbond Sealant puits et fissures est un dispositif médical de classe IIa selon la réglementation EC - Directive MDD 93/42 EEC. Ce produit est réservé à l'usage exclusif des dentistes. Lire attentivement les informations figurant sur la notice.