

NOUVEAU

Brush-dip

issu de la technologie Superbond

Un Nouveau Système de Contention

- Contention des dents mobiles
- Contention post-orthodontique

Sans fil métallique
Sans fibre synthétique
Sans adhésif
Sans composite

Seulement le
BrushDip



Cas clinique du Dr Cazier (Paris-France)



Une contention fine, esthétique,
idéale pour le patient

Très facile à utiliser



Une poudre Spéciale Translucide avec des particules sphériques pour un meilleur mélange poudre/liquide



Un godet de mélange en plastique utilisable à température ambiante



Un acide de mordantage émail en gel


Mordancer l'émail avec le gel fourni



- Déposer une quantité suffisante de Poudre Brushdip dans une cupule de mélange à droite.
- Placer 4 gouttes de Monomère et 1 goutte d'Initiateur (seringue) dans une cupule de mélange à gauche.
- Appliquer d'abord sur l'émail mordancé un peu du mélange des 2 liquides.
- Tremper à nouveau le pinceau dans ce mélange des 2 liquides.



- Venir prélever de la poudre avec le pinceau dans un petit mouvement circulaire lent.
- La poudre monte dans le pinceau et forme une boule de résine.

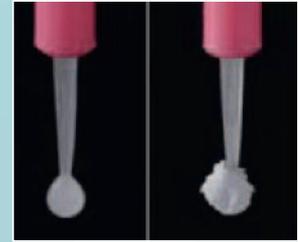

- A gauche, la boule de résine est parfaite.
- A droite, il y a un excès de poudre. Dans ce cas, lors de l'application, on tapotera avec le pinceau pour humecter l'excès de poudre et obtenir une surface lisse et homogène.



• Temps de prise : 5 mn

Polissage à la séance suivante (basse vitesse sous irrigation)

Possibilité de recharger en Brushdip lors d'une séance ultérieure.

- Appliquer la résine Brushdip sur l'émail mordancé.
- Nettoyer rapidement le pinceau avec une compresse avant de replonger le pinceau dans le liquide et répéter l'opération.

Le coffret BrushDip contient :

- 1 Initiateur 0,3 ml
- 1 Gel mordantage émail 1 ml + aiguilles
- 1 Monomère rapide 3,5 ml
- 1 poudre translucide BrushDip 1,5 g
- 1 Godet de mélange + Cupules
- Pinceaux et manche
- 1 Mode d'emploi
- 1 Fiche cartonnée

Dispositif médical (DM) de Classe IIa, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lire attentivement avant l'utilisation le mode d'emploi et l'étiquetage

Organisme certificateur : TÜV SÜD Product Service GmbH